

VariLymph Pro

Pressothérapie professionnelle avec 12 chambres à air



Wellell

VariLymph Pro



L'utilisation de la compression pneumatique intermittente (IPC en anglais) est une thérapie pour le traitement des maladies lymphatiques et circulatoires, confortable et sans effets secondaires. Il se compose d'un compresseur qui soufflé de l'air dans les chambres recouvrant les membres. La pression et la durée de la thérapie peuvent être ajustées aux besoins et aux indications du patient.


Selon la Société Allemande de Phlébologie, les indications pour l'IPC sont les suivantes :

- Prophylaxie thromboembolique
- Ulcus cruris (ulcères)
- Œdème post-traumatique
- Œdème lipidique
- Œdème veineux
- Œdème lymphatique
- Œdèmes mixtes
- Occlusion artérielle périphérique
- Syndrome post-thrombotique
- Maladies sensorielles causées par l'hémiplégie, sous surveillance médicale stricte

Fonctionnement

1. Ajustement optimal de la gaine avec extension

- Elle doit être adaptée à la circonférence de la jambe et du bras.
- Doit être suffisamment longue.
- Pour le traitement du lymphœdème et du lipœdème, le bassin doit être entièrement couvert

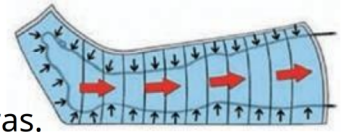

Jambière




Manchon



Pantalon

2. Les chambres vides sont remplies d'air par étapes successives.
3. La durée du remplissage dépend de l'anatomie du patient et du temps sélectionné. Ce processus permet d'évacuer le liquide des tissus afin de réduire l'œdème.
4. La pression, qui doit être réglée par un professionnel de santé, est adaptée précisément aux besoins du patient.
5. Lorsque toutes les chambres sont remplies, la gaine est gonflée pendant la durée du traitement définie. Après une courte pause, le cycle recommence. Pendant la pause thérapeutique, le sang oxygéné circule à nouveau dans les tissus.

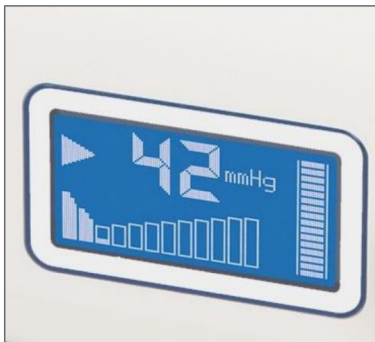

Compresseur avec affichage des informations et possibilité de raccorder jusqu'à 2 tuyaux



Gaine de qualité supérieure



Connecteur sécurisé et résistant à la torsion

