



chattanooga®

VOTRE SPÉCIALISTE EN RÉÉDUCATION

CATALOGUE

ARTROMOT®



ernovis

01

EXISTE DEPUIS 1947

Retrouvez-nous en ligne :



02

N°1 EN FRANCE DE LA RÉÉDUCATION

03

MARQUE DU GROUPE ENOVIS[™]

04

UN SERVICE APRÈS-VENTE BASÉ EN FRANCE

05

ACTIF DANS PLUS DE 100 PAYS

DOULEUR
Cefar[®] TENS



ÉLECTROTHÉRAPIE
Rehab



ULTRASON
Ultrason Intellect[®] Mobile 2



**ÉLECTRODES &
SONDES**



TAPE & CONSOMMABLE
Chatt-tape



* Prix à l'unité

THERMO-CRYOTHÉRAPIE
IceMan Clear^{3™}



L'OFFRE DE FORMATION



Faites appel à Chattanooga®; profitez de l'expertise de nos spécialistes et experts qui sont à votre disposition pour optimiser l'utilisation de nos dispositifs.

Découvrez l'intérêt de chaque modalité, combinez les effets et mettez en place les protocoles cliniques adaptés à la prise en charge des différentes indications.



**CALENDRIER
DES FORMATIONS**



**ARTICLES
BLOG**



**BIBLIOTHÈQUE
SCIENTIFIQUES**



**FORMATION EN LIGNE
24H/7J**

EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous : events.fra@enovis.com

SOMMAIRE

Introduction Artromot®	2
Artromot® de Genou/Hanche - K1 Classic	4
Tableau comparatif Artromot® K1	5
Artromot® d'épaule - S3 Comfort	6
Artromot® d'épaule - S4	8
Artromot® de coude - E2	10
Artromot® de cheville - SP3 Standard	11
Accessoires Artromot® - CPM	12

THÉRAPIES COMBINÉES

Pack Essentiels Intellect® Neo



DÉCOMPRESSION

Triton® 3-M + Triton®



ARTROMOT® CPM

K1 Classic



ONDES DE CHOC

Intellect® RPW 2



LIGHTFORCE®

XLi (40 W)



DÉFINITION

ARTROMOT® : LES ATTELLES DE MOBILISATION

Les attelles de mobilisation Artromot® servent au mouvement post-opératoire, passif et continu, d'articulations (continuous passive motion = CPM). Elles existent pour les articulations suivantes : Épaule, Genou et Hanche, Coude, Cheville.

EFFETS

LA THÉRAPIE AVEC LES ATTELLES DE MOBILISATION ARTROMOT®.

- Prévient les immobilisations et les raideurs articulaires (arthrofibrose)
- Améliore la guérison de cartilages articulaires, tendons, ligaments et de tissus mous
- Favorise la résorption des épanchements
- Atténue les douleurs
- Améliore le métabolisme
- Raccourcit le séjour en hôpital et la durée totale du traitement

GAGES DE SÉRÉNITÉ

LES ATTELLES ARTROMOT® SONT DÉVELOPPÉES ET FABRIQUÉES PAR LA SOCIÉTÉ ORMED-DJO GERMANY, LEADER DU MARCHÉ DES ATTELLES DE MOBILISATION MOTORISÉES.

- Maintenance assurée directement par le fabricant.
- Expérience de plus de 20 ans dans le développement de CPM
- Fabriquées en Allemagne



PROTOCOLE

Les attelles de mobilisation Artromot® sont généralement utilisées pour un traitement directement post-opératoire ou à partir de la première semaine suivant l'opération

La durée quotidienne du traitement peut varier selon la blessure ou la maladie :

- 3 à 4 heures (recommandation générale)
- Jusqu'à 24 heures dans le cas d'opérations et de blessures au niveau du cartilage articulaire

SOINS À DOMICILE/SERVICE DE LOCATION

Les attelles de mobilisation Artromot® sont utilisées aussi bien dans les cliniques que pour le traitement ambulatoire de patients à la maison.

- **NON INVASIVE**
- **UTILISATION POST-OPÉATOIRE**
- **MOBILISATION PRÉCOCE**
- **UTILISATION MAINS LIBRES**

BIBLIOGRAPHIE

Extrait de la publication actuelle de la méta-analyse du professeur Kirschner*.

« Globalement, la thérapie CPM doit être utilisée aujourd'hui comme traitement nécessaire, parce qu'elle est judicieuse (...) aussi bien en clinique que dans le cadre de soins ambulatoires car on observe de clairs avantages de traitement (...) ».

Extrait de l'étude multicentrique clinique randomisée prospective ouverte concernant des patients souffrant d'une rupture complète de la coiffe des rotateurs :**

« Comparé à un pur traitement post-opératoire de kinésithérapie, il fut possible de prouver de manière significative la supériorité de la thérapie combinée utilisant le traitement kinésithérapeutique et CPM, via des statistiques.

- Dans le groupe CPM, l'abduction à 90° a été atteinte beaucoup plus tôt
- Les patients du groupe CPM étaient aptes au travail plus rapidement
- La thérapie CPM a entraîné une atténuation plus nette de la douleur
- Aucune complication ni aucun risque causé par le traitement CPM, que ce soit en environnement clinique ou à domicile ».

Retrouvez la liste de nos études cliniques sur <http://intranet.djo.eu>



CONCLUSION : LA THÉRAPIE CPM AVEC ARTROMOT®

	MÉTA -ANALYSE*	ÉTUDE MULTICENTRIQUE**
Réduit la durée du séjour hospitalier ainsi que la durée totale du traitement	*	
Diminue considérablement le taux de mobilisation pendant une anesthésie	*	
Améliore la guérison de cartilages articulaires	*	
Diminue le risque de thrombose	*	
Favorise la résorption des épanchements	*	
Atténue les douleurs	*	**
Améliore la fonction articulaire	*	**
Réduit la durée d'incapacité de travail		**

* Résultats de la méta-analyse, Kirschner, P. (2004) : « CPM-Continuous Passive Motion : traitement, par le mouvement passif, des articulations d'un genou blessé ou opéré. Méta-analyse de la littérature actuelle » - Der Unfallchirurg, tome 107, 4/04.

** Résultats de l'étude multicentrique clinique randomisée prospective ouverte. Centres d'étude : Clinique et polyclinique orthopédique de l'université de Cologne : P. Eysel, D.P. König, J.W.P. Michael, Fondation de la clinique universitaire orthopédique de Heidelberg : M. Loew, M. Rickert, centre hospitalier Klinikum Rechts der Isar, Munich : A. Imhoff, V. Martinek, S. Braun, DRK Klinikum Westend, Berlin, B. Dreithaler, C. Koch, Arcus Sportklinik, Pforzheim : M. Speck, L. Bös, A. Bidner, Klinik am Ring, Cologne : S. Preis, F. Windgasse, J. Bernholt, T. Rudolph, N. Bernards, cabinet du Dr Hübscher, Kaufbeuren : Dr Hübscher.

« Efficacité du traitement post-opératoire au moyen d'attelles de mobilisation CPM en combinaison avec la kinésithérapie comparé à la thérapie exclusivement kinésithérapeutique pour les patients souffrant d'une rupture complète de la coiffe des rotateurs ».

INFORMATIONS DE COMMANDE

80.00.045 K1 CLASSIC

80.00.040 K1 STANDARD

80.00.042 K1 COMFORT

ACCESSOIRES STANDARDS INCLUS :

0.0037.061	Télécommande K1 Classic
0.0037.050	Télécommande K1 Standard
0.0037.054	Télécommande K1 Comfort

ACCESSOIRES EN OPTION :

80.00.055	Chariot de transport standard K1
80.00.065	Chariot de transport modulaire K1
2.0032.013	Coque/Hygiène pour support Jambes et cuisses K1 Comfort
EXTGAR	Extension de garantie 3 ans
MAINT3ART	Maintenance préventive 3 ans

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FONCTIONS DE L'ARTROMOT® - K1 CLASSIC :

Pauses (extension et flexion) :	0-59 secondes 1-59 minutes
Vitesse :	5 % - 100 % - 25 à 180°/min
Verrouillage des touches :	Empêche une modification non souhaitée des paramètres de traitement

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L'ARTROMOT® - K1 STANDARD :

Minuterie :	1-59 minutes / 1-24 heures Mode continu
Pauses (extension et/ou flexion) :	0-59 secondes / 1-59 minutes
Inversion de la charge par paliers :	1-25 / Commutation de sécurité
Programme d'échauffement :	Amener en douceur le patient vers l'amplitude de mouvement maximale en 15 cycles
Durée totale de la thérapie :	Enregistrement de la durée totale du traitement
Nouveau patient :	Réinitialisation des paramètres de base pour les nouveaux patients
Réglage pour le transport :	Met l'attelle en position de transport

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L'ARTROMOT® - K1 COMFORT :

Allongement (extension ou flexion) :	Travail en gain d'amplitude (+5°)
Programme confort :	Atteinte des paramètres maximaux d'amplitude au bout de 10 cycles avec 5 derniers cycles de progression degré par degré.
Répétition sur les derniers degrés (extension ou flexion) :	Augmente la fréquence de mouvements sur les 10 derniers degrés
Programme d'exercices complet :	Programme combinant 8 phases de 5 min. (échauffement, allongement, répétition, ...)
Suivi du déroulement de la thérapie :	Affiche tout le déroulement du traitement sous forme de graphique
Combinaison EMS :	Permet de combiner de manière optimale la thérapie CPM et l'électrothérapie

Télécharger le manuel d'utilisation de l'Artromot®-K1

L'Artromot®-K1 est un dispositif médical de classe IIa et a été évalué par l'organisme notifié DQS Medizinprodukte GmbH. Lire attentivement la notice. Fabricant : Ormed.

ARTROMOT®

80.00.045 - K1 CLASSIC

MOBILISATION DU GENOU/DE LA HANCHE

DIMENSIONS

- Poids : 11 kg.
- Dimensions L x P x H : 97 x 36 x 23 cm.
- Taille des patients : de 120 à 200 cm.

GARANTIE 2 ANS.



4 055,30€ TTC
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ

- TÉLÉCOMMANDE À POTENTIOMÈTRE
- LARGE AMPLITUDE -10° / + 120°
- INTUITIVITÉ
- QUALITÉ ALLEMANDE

INDICATIONS

- Arthrotomies, arthroscopies, arthroplasties
- Ligamentoplasties LCA/LCP, LLE/LLI
- Fractures patellaires
- Ostéosynthèses
- Interventions sur les tissus mous adjacents à une articulation ou cartilage
- Ostéotomies de varisation/valgisation
- Ménisectomies

CARACTÉRISTIQUES

- Ergonomie et hygiène optimales grâce à une très grande simplicité de réglage et à une désinfection par essuyage des appui-pieds et appui-jambes
- Télécommande incluse : ultra simple à potentiomètre. Fonctions : flexion, extension, temps et pause
- Chariot de transport standard ou modulaire (en option) qui augmente la durée de vie de l'attelle par un meilleur stockage et permet le traitement au lit du patient
- Amplitude de mouvements :
 - Extension/Flexion « genou » -10° / 0° / 120°
 - Extension/Flexion « hanche » 0° / 7° / 115°

EXISTE EN VERSIONS STANDARD ET COMFORT :

80.00.040 - ARTROMOT®-K1 STANDARD

- 3 menus proposant les fonctions inversion de charge, échauffement, nouveau patient (réinitialisation des paramètres), position de transport.

80.00.042 - ARTROMOT®-K1 COMFORT

- 5 menus proposant des fonctions supplémentaires : répétition, allongement (gain d'amplitude), graphique, EMS, exercices complet, confort.

4 387€ TTC
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ

4 922€ TTC
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ

TABLEAU COMPARATIF DE ARTROMOT®-K1

MODÈLE	ARTROMOT®-K1 CLASSIC	ARTROMOT®-K1 STANDARD	ARTROMOT®-K1 COMFORT
			
AMPLITUDES			
ROM Genou (Amplitude articulaire)	-10° / 120°	-10° / 120°	-10° / 120°
ROM Hanche	0° / 115°	0° / 115°	0° / 115°
Flexion Dorsale/Flexion Plantaire	Sans limite	Sans limite	Sans limite
Rotation Externe/Rotation Interne	50° / -50°	50° / -50°	50° / -50°
Taille patient	120 - 200 cm	120 - 200 cm	120 - 200 cm
Segment Fémur	31 - 49 cm	31 - 49 cm	31 - 49 cm
Segment Jambe	25 - 57 cm	25 - 57 cm	25 - 57 cm
Longueur totale	56 - 106 cm	56 - 106 cm	56 - 106 cm
FONCTIONS			
Vitesse ajustable	25° à 180° par min (5% - 100%)	25° à 180° par min (5% - 100%)	25° à 180° par min (5% - 100%)
Pause en Extension/Flexion (posture)	X	X	X
Inversion de charge		Ajustable (1 - 30 Kg)	Ajustable (1 - 30 Kg)
Echauffement		X	X
Verrouillage	X	X	X
GAIN D'AMPLITUDES			
Allongement Extension/Flexion			X
Programme Confort			X
Répétition sur les derniers degrés			X
PROGRAMMES			
Timer		X	X
Combinaison EMS			X
Graphique déroulement de la thérapie			X
Menu Transport		X	X
Nouveau patient (réinitialisation des paramètres)		X	X
ACCESSOIRES			
Chariot	Standard ou Modulaire	Standard ou Modulaire	Standard ou Modulaire
Commande	Télécommande à potentiomètre	Télécommande Graphique Carte patient Chip	Télécommande Graphique Carte patient Chip
Transport	Sac/Caisse de transport	Sac/Caisse de transport	Sac/Caisse de transport
Dimensions	97 x 36 x 23 cm	97 x 36 x 23 cm	97 x 36 x 23 cm
Poids	11 Kg	11 Kg	11 Kg
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

CHARIOT DE TRANSPORT STANDARD



CAISSE DE TRANSPORT



MOBILISATION DE L'ÉPAULE

- **2 MOTEURS**
- **FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L'ARTROMOT® S3 COMFORT** : repose tête, fixation de l'épaule, oscillations, programme d'échauffement, suivi...
- **QUALITÉ ALLEMANDE**

INDICATIONS

- Arthrotomies, arthroscopies combinées à une synovectomie ou une arthrolyse
- Après une mobilisation de l'articulation pendant une anesthésie
- Fractures traitées chirurgicalement et pseudarthroses
- Ostéosynthèses stables, aptes à supporter les exercices
- Implantation d'endoprothèses
- Syndromes du conflit sous-acromial traités chirurgicalement
- Acromioplasties
- Opérations de décompression
- Reconstruction de la coiffe des rotateurs

CARACTÉRISTIQUES

- Télécommande avec affichage graphique
- Réglage des amplitudes sur la télécommande
- **2 moteurs** : Abduction/Adduction, Rotation Interne/Externe
- **Repose-tête** : Mouvement d'après le modèle PNF
- **Fixation de l'épaule** : Mouvements d'ondulation en forme de 8
- **Oscillation** : Augmente la fréquence de mouvement dans une même amplitude
- **Allongement (ABD ou ROT-I ou TOR-E)** : Permet d'augmenter en douceur l'amplitude des mouvements
- **Programme ISO ABD ROT** : Permet un exercice séparé des deux sens de mouvement
- **Programme d'échauffement** : Pour amener en douceur le patient vers l'amplitude de mouvement maximale
- **Suivi du déroulement de la thérapie** : Affiche le déroulement de tout le traitement

DIMENSIONS

- Poids : 25 kg
- Dimensions L x P x H : 87,5 x 57,5 x 58 cm
- Dimensions de transport L x P x H : 37 x 57,5 x 58 cm

GARANTIE 2 ANS.

Unité de programmation manuelle
avec affichage graphique

ADDUCTION/ABDUCTION (0° / 30° / 175°)**ÉLÉVATION (0° / 30° / 175°)****ROTATION EXTERNE/INTERNE (90° / 0° / 90°)****MOUVEMENT PHYSIOLOGIQUE (0° - 0° - 120°)**



8 157,49€ TTC
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ

ARTROMOT®-S3 Comfort avec repose tête

EXISTE EN VERSIONS STANDARD
80.00.023- ARTROMOT®-S3 STANDARD
(sans repose tête)

7 724,40€ TTC
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ

INFORMATIONS DE COMMANDE

80.00.023 S3

ACCESSOIRES STANDARDS INCLUS

0.0031.006-C 10 cartes patient + 1 stylo + gomme

0.0034.300 Télécommande pour ARTROMOT-S3

ACCESSOIRES EN OPTION

0.0034.300 Télécommande pour ARTROMOT-S3

EXTGAR-S Extension de garantie 3 ans

80.00.024 S3 COMFORT (avec repose tête)

ACCESSOIRES STANDARDS INCLUS

0.0031.006-C 10 cartes patient + 1 stylo + gomme

0.0034.310 Télécommande pour ARTROMOT-S3 COMFORT

ACCESSOIRES EN OPTION

0.0034.310 Télécommande pour ARTROMOT-S3 COMFORT

EXTGAR-S Extension de garantie 3 ans

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES S3

Minuterie : 1 - 300 minutes / Mode continu

Pauses : 0-30 secondes

Vitesse (ABD/ADD) : 1% - 100%, 12 À 180°/min

Inversion de la charge par paliers (moteurs A et B séparés) : 1 - 25 / Commutation de sécurité

Durée totale de la thérapie : Enregistrement de la durée totale du traitement

Carte à puce patient : Pour l'enregistrement des paramètres de traitement

Moteurs A et B : Marche/Arrêt, Mouvement isolé, uniquement Abduction / adduction ou Rotation interne / externe

Mode de fonctionnement
Synchrone / Asynchrone : Synchrone : mouvements suivant la méthode FNP
Asynchrone : mouvements aléatoires dans les amplitudes de mouvement réglées

Nouveau patient : Pour le réglage de base pour les nouveaux patients

Réglage pour le transport Met les moteurs en position de transport

Verrouillage des touches : Empêche une modification non souhaitée des paramètres de traitement



Télécharger le manuel
d'utilisation de
l'Artromot® S3
Chattanooga

L'Artromot®-S3 Standard ou Comfort est un dispositif médical de classe IIa et a été évalué par l'organisme notifié DQS Medizinprodukte GmbH. Lire attentivement la notice. Fabricant : Ormed.

ARTROMOT™

80.00.084C - S4

MOBILISATION DE L'ÉPAULE

- 3 MOTEURS
- CONVERSION DROITE / GAUCHE FACILE
- LE PROTOCOLE ONDULATION / VAGUE
- QUALITÉ ALLEMANDE

INDICATIONS

- Rupture de coiffe des rotateurs
- Arthroplasties d'épaule
- Chirurgie après instabilité de l'épaule
- Acromioplasties
- Mobilisation après arthroscopie

CARACTÉRISTIQUES

- Télécommande à écran couleur tactile
- Réglage des amplitudes sur la télécommande ou directement au niveau d'interrupteurs situés au niveau de chaque moteur
- **3 moteurs** : Antéversion/Rétroversion, Abduction/Adduction, Rotation Interne/Externe
- **Élévation avec bras fléchi ou en extension**
- Intuitif pour faciliter la conversion en quelques secondes du dispositif en traitement de l'épaule droite ou gauche
- **Ondulation PNF et en 8 « Vague »**
- Inversion de la charge ajustable (pour la sécurité du patient)
- Cartes patient et câble d'alimentation (en option)

DIMENSIONS

- Poids : 28 kg
- Dimensions L x P x H : 166 x 100 x 160 cm
- Taille des patients : de 120 à 210 cm

GARANTIE 2 ANS.



12 615,30€ TTC
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ



3 MOTEURS

pour tous axes de mouvements

A. Antéversion/
Rétroversion

B. Adduction/
Abduction
Extension/
Flexion
(élévation)

ACCOUDOIR RENFORCÉ
avec largeur et hauteur réglables

C. Rotation
interne/externe

CONTRÔLES MOTEUR
pour une programmation
des amplitudes articulaires



ÉCRAN TACTILE
simple d'utilisation,
intuitif et icônes
descriptives

INFORMATIONS DE COMMANDE

80.00.084C

S4

ACCESSOIRES STANDARDS INCLUS

- 5 cartes patient + 1 stylo

ACCESSOIRES EN OPTION

0.0050.330 Carte patient

0.0050.330S 10 cartes patient + 1 stylo

EXTGAR-S Extension de garantie 3 ans

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Minuterie :	1-59 minutes, 1-12 heures / fonctionnement continu
Pauses :	0-30 secondes
Vitesse :	5-100%
Charge adaptative :	5-100% du seuil de tolérance de détente (sécurité patient et protection spasme)
MARCHE/ARRÊT Moteurs A, B et C :	Mouvements isolés : abduction/ adduction, antéversion/rétro- version ou rotation interne/externe
Nouveau patient :	Restauration des paramètres par défaut pour les nouveaux patients
Programme d'échauffement :	Progression graduelle de l'amplitude de mouvement jusqu'au maximum
Conversion droite/ gauche :	Réversibilité de l'appareil en épaule droite ou gauche
Fonctions de blocage :	Blocage individuel des fonctions pour éviter tout changements accidentels de paramètres et faciliter l'utilisation
Mode d'affichage :	Bascule entre vue détaillée et vue standard
Temps d'utilisation total :	Addition du temps d'utilisation de toutes les sessions thérapeutiques
Documentation :	Graphique d'évolution de la thérapie par patient
Cycles :	5-20, ajustement des répétitions de programmes d'isolation, oscillation et stretching
Veille :	Ajustement d'énergie lors des phases inactives du mode isolation
Direction de l'ondulation :	Ajustement de la direction de mouvement en mode ondulation (vague)
Configuration :	Ajustement des paramètres basics (date, heure, langue...)
Position transport :	Mettre les moteurs en position transport
Menu Service :	Pour le service technique
Carte patient :	Sauvegarde des paramètres de thérapie par patient
Appui-tête :	Confort et posture optimale du patient
Contrôle moteur :	Contrôle direct des amplitudes de mouvement

MOUVEMENTS COMBINÉS

PNF :	Mouvement d'après le modèle PNF
Ondulation :	Mouvements d'ondulation en forme de 8
Isolation :	Permet la séparation d'exercices avec 3 directions de mouvement en un seul traitement
Oscillation :	Augmente la fréquence de mouvement dans une même amplitude
Stretching :	Augmente la gamme de mouvement petit à petit



Télécharger le manuel
d'utilisation de
l'Artromot®-S4

L'Artromot®-S4 est un dispositif médical de classe IIa et a été évalué par l'organisme notifié DQS Medizinprodukte GmbH. Lire attentivement la notice. Fabricant : Ormed.

INFORMATIONS DE COMMANDE

80.00.031 E2 (AVEC CHAISE)

80.00.033 E2 COMPACT

ACCESSOIRES STANDARDS INCLUS

- 5 cartes patient + 1 stylo

ACCESSOIRES EN OPTION

EXTGAR Extension de garantie 3 ans
MAINT3ART Maintenance préventive 3 ans

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Commande du moteur :	Marche/Arrêt pour un mouvement isolé extension/flexion ou pronation/supination
Synchronisation des moteurs :	Marche/Arrêt
Vitesse :	1% - 100% 2,3 à 230°/min
Minuterie :	1 minute - 24 heures / Mode continu
Pauses :	0 - 60 minutes
Inversion de la charge par paliers (moteurs A et B séparés) :	1 - 25 / Commutation de sécurité
Durée totale de la thérapie :	Enregistrement de la durée totale du traitement
Programme d'échauffement :	Pour amener en douceur le patient vers l'amplitude de mouvement maximale
Carte à puce patient :	Pour l'enregistrement des paramètres de traitement
Nouveau patient :	Pour le réglage de base pour les nouveaux patients
Programme ISO Motion :	Permet un exercice séparé des deux sens de mouvement
Répétition sur les derniers degrés (EX-PRO-FLEX/SUP) :	Augmente la fréquence de mouvements sur les derniers degrés
Allongement (EX-FLEX-PRO-SUP) :	Permet d'augmenter en douceur l'amplitude de mouvement
Suivi du déroulement de la thérapie :	Affiche le déroulement de tout le traitement (abduction et adduction/rotation interne et rotation externe)
Verrouillage des touches :	Empêche une modification non souhaitée des paramètres de traitement
Réglage pour le transport :	Met les moteurs en position de transport

DIMENSIONS

Poids : 28,7 kg
Dimensions L x P x H : 87,5 x 57,5 x 58 cm


 Télécharger le manuel d'utilisation de l'Artromot®-E2

L'Artromot® E2 est un dispositif médical de classe IIa et a été évalué par l'organisme notifié DQS Medizinprodukte GmbH. Lire attentivement la notice. Fabricant : Ormed.

ARTROMOT®

80.00.031 - E2

MOBILISATION DU COUDE



8 774€ TTC
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ

- CONFIGURATION MOBILE (E2 COMPACT) OU AVEC CHAISE
- CONVERSION DROITE / GAUCHE FACILE
- QUALITÉ ALLEMANDE

INDICATIONS

- Arthrotomies, arthroscopies combinées à une synovectomie ou une arthrolyse
- Fractures métaphysaires et ostéosynthèses
- Arthroplastie du coude
- Interventions sur les tissus mous adjacents à l'articulation

CARACTÉRISTIQUES

- Permet des mouvements adaptés à l'anatomie (méthode FNP)
- Ergonomie et hygiène optimales grâce à une très grande simplicité de réglage et à une désinfection par essuyage des appuis-bras et main
- Reversibilité - Inversion Droite/Gauche ultra simple
- Unité de programmation manuelle avec affichage graphique incluse
- Livré avec la chaise et 5 cartes patient

GARANTIE 2 ANS.



EXISTE EN VERSION COMFORT
80.00.033 - ARTROMOT®-E2 COMPACT

- Livré sans chaise (support mobile)
- Poids : 17 kg
- Dimensions L x P x H : 87,5 x 57,5 x 29 cm

8 313,90€ TTC
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ

AMPLITUDES DE MOUVEMENTS

FLEXION ET EXTENSION -5° / 0° / 140°



PRONATION ET SUPINATION 90° / 0° / 90°



ARTROMOT™

80.00.035 - SP3 STANDARD



MOBILISATION DE LA CHEVILLE



6 484,20€ TTC
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ

- UTILISATION SUR CHAISE OU LIT DU PATIENT
- QUALITÉ ALLEMANDE

INDICATIONS

- Fractures malléolaires
- Fractures calcanéennes et de l'astragale
- Mobilisation après interventions de reconstruction au niveau des ligaments latéraux de la cheville
- Mobilisation après traitement opératoire ou non du tendon d'Achille

CARACTÉRISTIQUES



- Permet des mouvements adaptés à l'anatomie (méthode FNP)
- Ergonomie et hygiène optimales grâce à une très grande simplicité de réglage et à une désinfection par essuyage des appui-pieds et appui-jambes
- Unité de programmation manuelle avec affichage graphique incluse
- Chariot de transport standard ou modulaire (en option) qui augmente la durée de vie de l'attelle par un meilleur stockage

GARANTIE 2 ANS.

EXISTE EN VERSION COMFORT
80.00.037 - ARTROMOT®-SP3 COMFORT

6 708,90€ TTC
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ

- **Programmes d'allongement** : Permet de travailler progressivement le gain d'amplitude
- **Suivi du déroulement de la thérapie** : Affiche le déroulement de tout le traitement sous forme de graphique (flexion plantaire et extension dorsale / Inversion et éversion)
- **Programme d'échauffement** : Pour amener en douceur le patient vers l'amplitude de mouvement maximale

AMPLITUDES DE MOUVEMENTS

FLEXION PLANTAIRE ET DORSALE 50°/0°/40°



INVERSION ET ÉVERSION 40°/0°/20°



INFORMATIONS DE COMMANDE

80.00.035 SP3 STANDARD

80.00.037 SP3 COMFORT

ACCESSOIRES STANDARDS INCLUS

80.00.066	Chariot de transport modulaire pour SP3
EXTGAR	Extension de garantie 3 ans
MAINT3ART	Maintenance préventive 3 ans

ACCESSOIRES EN OPTION

80.00.066	Chariot de transport modulaire pour SP3
EXTGAR	Extension de garantie 3 ans
MAINT3ART	Maintenance préventive 3 ans

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Minuterie :	1-59 minutes / 1-24 heures / Mode continu
Pauses :	0 - 59 secondes
Vitesse :	5 % - 100 % 23 à 200°/min
Inversion de la charge par paliers (moteurs A et B séparés) :	1 - 25 / commutation de sécurité
Moteurs A et B :	Marche/Arrêt. Mouvement isolé, uniquement flexion plantaire / extension dorsale ou inversion / éversion
Mode de fonctionnement Synchrone/ Asynchrone :	Synchrone : mouvements suivant la méthode FNP Asynchrone : mouvements aléatoires dans les amplitudes de mouvement réglées
Durée totale de la thérapie :	Enregistrement de la durée totale du traitement
Nouveau patient :	Pour le réglage de base pour les nouveaux patients
Réglage pour le transport :	Met l'attelle en position de transport
Verrouillage des touches :	Empêche une modification non souhaitée des paramètres de traitement

DIMENSIONS

Poids :	11 kg
Dimensions L x P x H :	78 x 42 x 39,5 cm
Taille des patients :	de 120 à 200 cm



Télécharger le manuel
d'utilisation de
l'Artromot®-SP3

L'Artromot® SP3 est un dispositif médical de classe IIa et a été évalué par l'organisme notifié DQS Medizinprodukte GmbH. Lire attentivement la notice. Fabricant : Ormed.

	CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC CONSEILLÉ (TTC)
SERVICES EN OPTION (HORS ARTROMOT®-S4 et S3 / S3 COMFORT)			
	80.00.066	Chariot de transport modulaire pour SP3	1044,75
	0.0037.061	Télécommande pour Artromot® - K1 Classic	808,50
	0.0037.050	Télécommande pour Artromot® - K1 Standard	1025,85
	0.0037.054	Télécommande pour Artromot® - K1 Comfort	1025,85
	80.00.055	Chariot de transport standard pour Artromot® - K1	427,35
	80.00.065	Chariot de transport modulaire pour Artromot® - K1	1044,75
	2.0032.013	Coque/Hygiène pour support Jambes et cuisses pour Artromot® - K1 Comfort	178,50
	EXTGAR	Extension de garantie 3 ans	1 127,50
	MAINT3ART	Maintenance préventive 3 ans	615,00
ARTROMOT®-S4 et S3 / S3 COMFORT			
	0.0034.300	Télécommande pour Artromot® - S3	694,20
	0.0034.310	Télécommande pour Artromot® - S3 Comfort	660,00
	0.0050.330	Carte patient	14,23
	0.0050.330S	10 cartes patient + 1 stylo	140,70
	0.0031.006-C	10 cartes patient + 1 stylo + gomme pour Artromot®-S3	141,00
	EXTGAR-S	Extension de garantie 3 ans	1 640,00



Creating Better Together™



Retrouvez-nous en ligne

WEB | BLOG | FORMATION | CEFARTENS



Enovis™ - DJO France S.A.S.

| C.E.F. | 3 rue de Bethar | 64990 Mouguerre | France

@Enovis™ - MKGRSMED23 - Rev K - 12/2023 - Dispositifs médicaux de classe I, IIa et IIb qui portent, au titre de la réglementation, le marquage CE et évalués par l'organisme notifié BSI. Lire attentivement les notices. Fabricant : DJO France S.A.S. (sauf mentions spécifiques).
* Créer Mieux Ensemble.

